

# Granudacyn®

## žaizdų plovimo tirpalas

NAUJIENA!

Granudacyn® žaizdų plovimo tirpalas yra skirtas ūmių, lėtinių bei infekuotų žaizdų, taip pat pirmojo ir antrojo laipsnio nudegimų valymui. Hipochlorito rūgštis (HOCl) užtikrina žaizdos apsaugą ir sustabdo Gram+ ir Gram- bakterijų proliferaciją, įskaitant MRSA, ORSA, VRSA, VRE virusus, grybelius ir sporas<sup>1</sup>.




### Granudacyn® pranašumai

- Mechanškai išvalo žaizdą
- Sterilus bei neutralus pH
- Necitotoksinis ir nedirginantis
- Hipotoninis
- Gali kontaktuoti su CNS audiniais, kremzlėmis, kaulais
- Pirmas pasirinkimas pilvaplėvės plovimui<sup>2</sup>
- Tinkamas plauti ertmėms, pūliniams ir fistulėms
- Gali likti žaizdoje
- Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų
- Naikina blogą žaizdos kvapą<sup>2</sup>

## Kaip veikia Gradunacyn®?

Atidaryta Gradunacyn® tirpalo pakuotė turi būti sunaudota per 60, o gelis – 90 dienų.

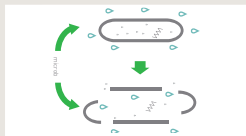

### 1. Suardomos ląstelių sienelių struktūros

Granudacyn® žaizdų plovimo tirpalas apsauga mikroorganizmus ir jame esanti hipochlorito rūgštis veikia ląstelės sienelę, padidindama jos pralaidumą<sup>3</sup>.



### 2. Osmolizė lemia ląstelės plyšimą

Granudacyn® yra hipotoninis tirpalas, dėl kurio vandens molekulės plūsta į žaizdoje esančių mikroorganizmų ląsteles ir didina jų vidinį slėgį, kol ląstelės plyšta.

## Granudacyn® gali būti naudojamas šių žaizdų plovimui ir valymui:

- Visoms įvairių gylių lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip pragulos, veninės kojų opos, diabetinės pėdos opos ir kt.
- Visoms ūmioms žaizdoms, tokioms kaip įkandimai, įpjovimai, įplyšimai, nubrozdinimai ir kt.
- Chirurginėms žaizdoms (operacijos metu ir po jos)
- Žaizdoms su atviromis kremzlėmis, sausgyslėmis, raiščiais ir/arba kaulais
- Pirmo ir antro laipsnio nudegimams
- Radioterapijos sukeltiems odos pažeidimams
- Fistulėms ir pūliniams

## Kaip naudoti Granudacyn®?

Tirpalas ir purškiklis: sukurtas plovimui ir tiksliam pritaikymui.



1. Efektyvus žaizdų plovimas su Granudacyn® tirpalu



2A. Purškikite iš ~15–30cm ant išvalytos žaizdos.



2B. Nuvalykite žaizdą arba naudokite tirpalu sudrėkintą kompresą.



3. Galima derinti su standartiniais žaizdų tvarščiais.

## Produkto informacija

Ref. nr.	Produktas	Talpa	TRP
360100	Granudacyn® žaizdų plovimo tirpalas	250 ml	15
360101		500 ml	12
360102		1000 ml	6

**Daugiau informacijos [www.molnlycke.lt](http://www.molnlycke.lt)**

## Žaizdų priežiūros specialistai

Vilniuje tel. +370 685 86850

Kaune tel. +370 656 49744

Klaipėdoje tel. +370 659 76791

Mölnlycke ir Granudacyn yra registruoti Mölnlycke Health Care prekiniai ženklai. © 2020 Mölnlycke Health Care AB Visos teisės saugomos.

**Sudėtis:** vanduo, natrio chloritas, natrio hipochloritas ir hipochlorito rūgštis. Santykinė hipochlorito rūgšties ir natrio hipochlorito koncentracija priklauso nuo pH. Esant neutraliam pH Granudacyn žaizdų plovimo tirpalą sudaro 50 ppm HOCl and 50 ppm NaOCl.

**Literatūros šaltiniai:** 1. In-vitro suspension test [EN13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – phase 2] with Granudacyn® wound irrigation solution. 2. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58, DOI:10.1159/000481545. 3. Fukuzaki, Biocontrol Science, 2006, Vol. 11, No. 4, 147–157. 4. Method Ph.Eur. 2.2.35, test conducted by BIOSERV Analytik- und Medizinprodukte GmbH, Rostock, Germany Mölnlycke Health Care UAB, Jonavos g. 30, 44262 Kaunas.

  
**Mölnlycke®**